


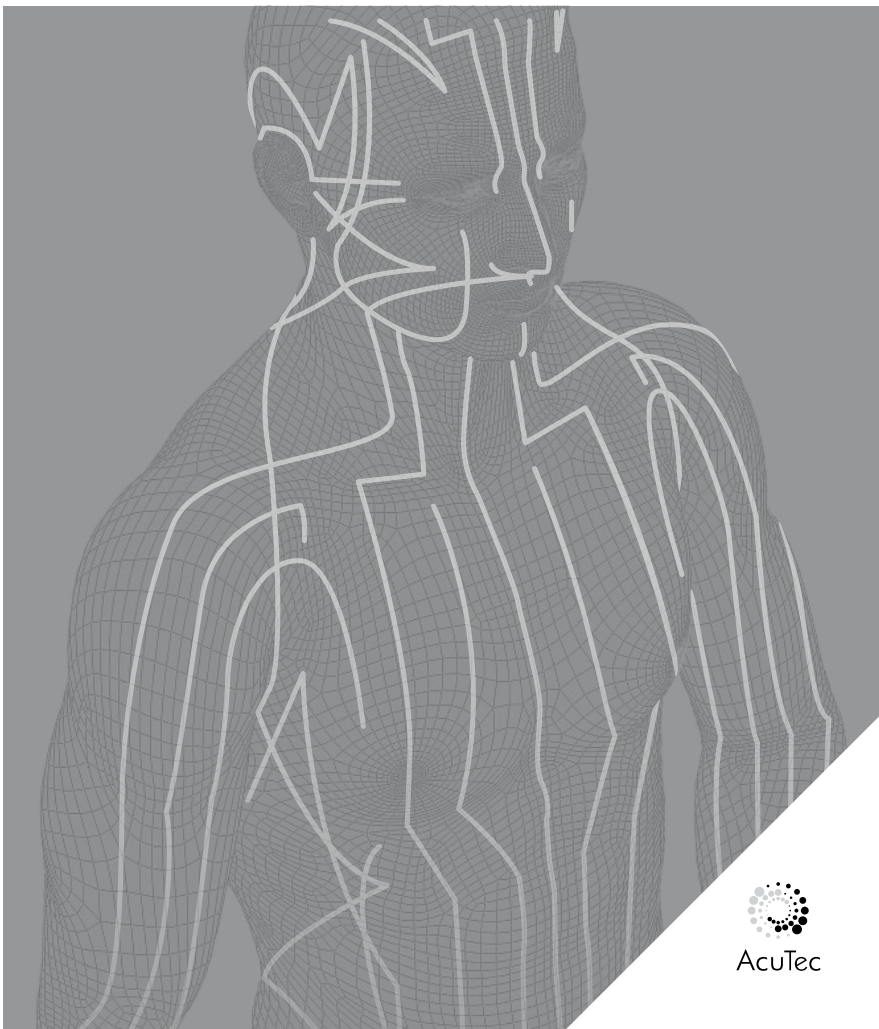

e-atlas

14 Meridianos




AcuTec

1. Iniciando o Uso

O E-atlas inicia-se no Meridiano “Pulmão”, visão geral. Para alterar o Meridiano, clique na aba “Meridiano”, como demonstra a figura ao lado:




Uma lista com os 14 meridianos, surgirá. Clique no meridiano desejado:

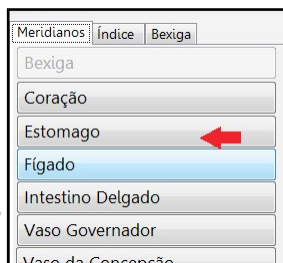


Aparecerá a visão geral deste meridiano e uma lista, com todos os seus pontos.

2. Navegando entre os pontos

- você pode clicar no ponto desejado na lista:

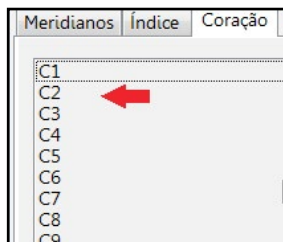

- Você pode ir para o próximo ponto ou para o ponto anterior, utilizando os botões de navegação, ou simplesmente digitar o nome do ponto na caixa de texto, no final da lista:

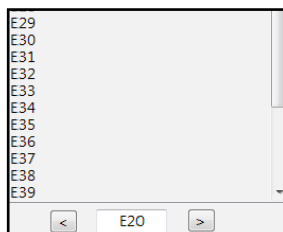


Outra opção é navegar entre os pontos, através dos botões, no canto superior direito da tela:



3. Pontos citados - “Combinação e Tratamento”


Para visualizar o ponto basta clicar sobre o mesmo.

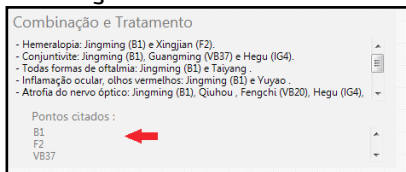

4. Utilizando o Índice

Clique na aba Índice, conforme imagem ao lado:

Aparecerá uma lista com todos os sintomas e indicações. Para visualizar os pontos relacionados, clique sobre o item desejado. Uma lista de pontos associados a esta indicação, aparecerá:

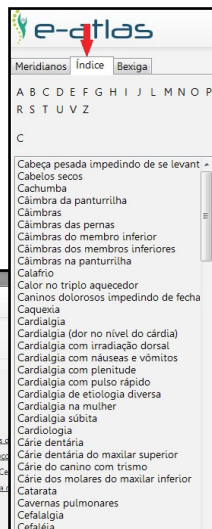

12 Meridianos + 2 Curiosos

Meridianos Índice

A B C D E F G H I J L M N O P
R S T U V Z
C

Cabeça pesada impedindo de se levantar
Cabelos secos
Cachumba
Cãimbra da panturrilha
Cãibras
Cãibras das pernas
Cãibras do membro inferior
Cãibras dos membros inferiores
Cãibras na panturrilha
Calafrio
Calor no triplo aquecedor
Caninos dolorosos impedindo de fechar
Caquexia
Cardialgia
Cardialgia (dor no nível do cárdia)
Cardialgia com irradiação dorsal
Cardialgia com náuseas e vômitos
Cardialgia com plenitude
Cardialgia com pulso rápido
Cardialgia de etiologia diversa
Cardialgia na mulher
Cardialgia súbita
Cardiologia
Cárie dentária
Cárie dentária do maxilar superior
Cárie do canino com trismo
Cárie dos molares do maxilar inferior
Catarata
Cavernas pulmonares
Cefalalgia
Cefaleia

Resultados da Busca: "Cãibras"

5 Resultados

B18 Indicação: ... ra dos membros inferiores. Cãibras dos membros inferiores...

B30 Indicação: ... or. O Da Cheng acrescenta: Cãibras do membro inferior. Parestesias...

VB36 Indicação: ... or na face externa da perna. Cãibras na panturrilha. Rigidez do pescoço...

VB40 Indicação: ... Hérnia com tensão pévica. Cãibras das pernas. Dores das pernas. Ce...

VB44 Indicação: ... Hiponotalgia. Pasadeio. Cãibras. Funções. Abcessos. Cefaleia...

Termos semelhantes (Cãibras)

Cãibras dos membros inferiores
Cãibras do membro inferior
Cãibras na panturrilha
Cãibras das pernas

Na parte inferior da tela, temos uma lista com termos semelhantes, caso desejar uma pesquisa mais específica:

Termos semelhantes (Câimbras)


Câimbras dos membros inferiores
Câimbras do membro inferior
Câimbras na panturrilha
Câimbras das pernas
Câimbras

Para executar esta pesquisa, clique no termo desejado.

5. Visualizações dos pontos

Podemos visualizar a localização de um ponto, de três maneiras:


- Musculoesquelética (visualização inicial do ponto)

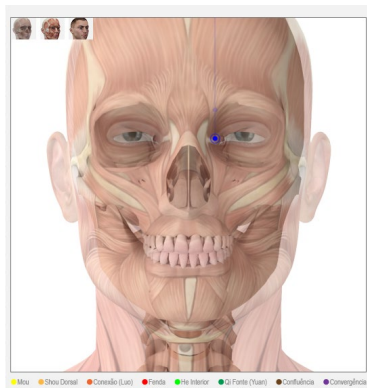


- Muscular – nome dos pontos



- Cutânea - local para aplicação da agulha ou moxa.

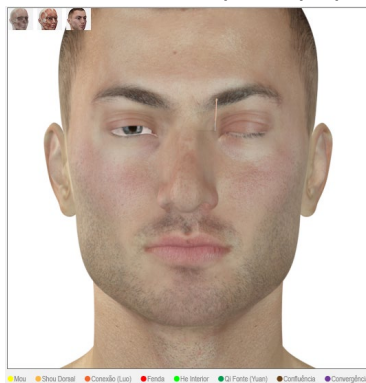


Para alterar a visualização, basta clicar nas figuras menores, no canto superior da Imagem:

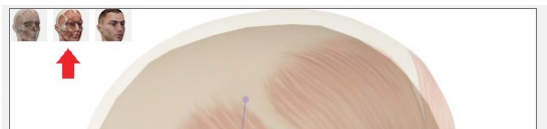

6. Pesquisar ponto/indicação

Para realizar uma pesquisa de ponto ou indicação, digite o termo na caixa de texto, no canto superior direito da tela e clique na “lupa” de pesquisa no lado direito:

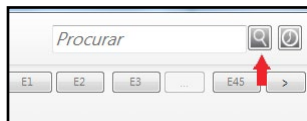

7. Última pesquisa

Para visualizar a última pesquisa realizada, clique no botão, conforme figura abaixo:



8. Restrição de conteúdo adulto

Caso necessite restringir o conteúdo das partes pudendas, clique no botão, conforme a figura abaixo. A próxima vez que as figuras forem carregadas, apresentarão o conteúdo pixelado.



9. Atualizações

Ao clicar neste botão, e utilizando sua senha e email cadastrados no site acutec.com.br é possível verificar e receber novas atualizações para o e-atlas 14 Meridianos.





AcuTec
www.acutec.com.br